

傷跡改善シリコンジェルスティック

# PROSIL®

プロシル



一般医療機器

### 禁忌・禁止

- ・開いている傷口や深い刺し傷には使用しないこと。
- ・本品は未滅菌のため、無菌管理が必要な部位には使用しないこと。

4.25g スティック

希望小売価格（税別）

¥5,900


傷跡やケロイドを目立たなく保護する液体包帯

- 傷跡のかゆみや不快感を和らげます
- 皮膚の凹凸や赤みの軽減が期待できます。
- 色がつかないので、目立たず、顔や首など、露出している傷跡にもお使いいただけます。

## 使用方法

- 塗布する場所を清潔にし、乾燥させてください。
- 1日2~3回、本品を傷跡にまんべんなく塗布してください。
- お子様や、敏感肌の方にもお使いいただけます。
- きれいな布かティッシュで簡単に拭き取れます。
- 推奨使用期間は8週間から12週間です。

**使用上の注意** ①冷暗所に保管してください。②アレルギーや湿しんが出た場合は、すぐに使用を中止してください。③本品は外用です。デリケートな部分へのご使用はお控えください。

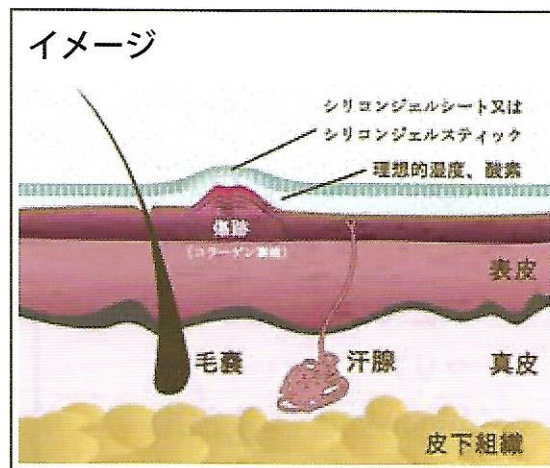

## “エピダーム／プロシルを使用した傷マネジメントとは？”

傷跡に“理想的な治癒環境”とは適切なバランスの湿度と最大限酸素があることです。傷跡に本品を使用することで密閉されたこの理想的な治癒環境を作り出し、余分な湿気を逃し、酸素が入り込むような環境をキープすることが可能です。

### 一般医療機器 関連情報

販売名：エピダーム

一般的名称：皮膚バリア粘着プレート

一般医療機器 04B3X10004000008

販売名：プロシル

一般的名称：液体包帯

一般医療機器 04B3X10004000010

輸入販売元：**ザイコア・インターナショナル・インク**

〒160-0022 東京都新宿区新宿 6-7-22 エルプリメント新宿 458

☎ 03-6457-8379 info@ziecor.com www.ziecor.com

製造元：

**BIODERMIS®**  
THE SCIENCE OF SKIN